


Preparación de las pinzas BIGopsy®: 3 sencillos pasos.


Tras retrocargar las pinzas BIGopsy a través del canal de trabajo del ureteroscopio, fije el mango a las pinzas siguiendo las instrucciones siguientes. Para agarrar adecuadamente el mango, introduzca el pulgar de la mano dominante en el anillo para pulgar y controle el carrete con los dedos índice y corazón de la misma mano.

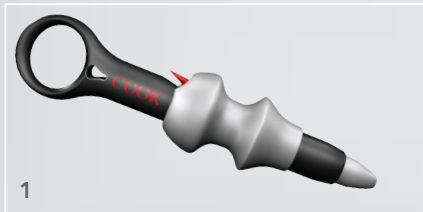

Utilice un dedo de la mano libre para pulsar el botón. Con la mano dominante, retraiga el carrete sobre el botón. Suelte el botón para fijar el mango en la posición retraída.



Con la mano libre, introduzca el cuerpo de las pinzas a través del mango hasta que pase por completo a través de la ventana de visualización del mango.

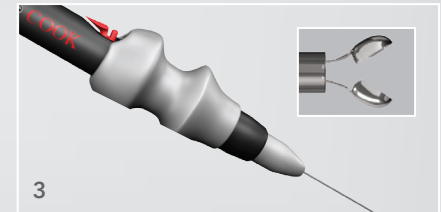

Mantenga firmemente el carrete en posición mientras pulsa el botón para soltar el carrete. Introduzca suavemente el carrete hasta dejarlo en su posición original para fijar el cuerpo de las pinzas en el mango.

BIGopsy®
PINZAS DE BIOPSIA DE RETROCARGA



www.cookmedical.com